

再使用禁止

エクアシールド・閉鎖式カテーテルコネクタ


【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止。

【形状、構造及び原理等】

本品は滅菌済み製品であり、一回限りの使用で再使用できない。

型番: LL-1C

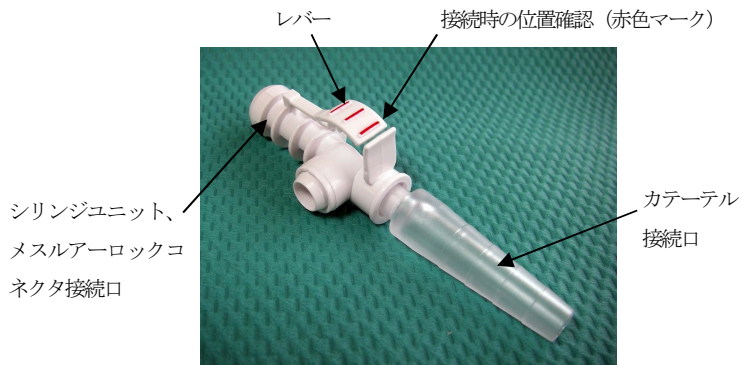

- ・本品は、DEHP等の可塑剤は含まない
- ・本品はラテックス成分を含まない。

【使用目的又は効果】

本品は、カテーテルを容器等の別の対象物に接続したり、灌注又は排液用カテーテルを身体に挿入するために用いる。


*【使用方法等】

本品の使用前に「取扱説明書」を確認すること。

- 本品のカテーテル接続口にカテーテルを接続する。
- 本品のシリンジユニット、メスルアーロックコネクタ接続口に、エクアシールド・シリンジユニット(「販売名:エクアシールド・シリンジユニット(届出番号23B1X90001000017)」)又は、エクアシールド・メスルアーロックコネクタ(「販売名:エクアシールド・メスルアーロックコネクタ(届出番号23B1X90001000013)」)を接続する。
接続時は本品にある位置確認(赤色マーク)を合わせて接続する。
接続後はねじったり、回転等をしないように注意する。
- エクアシールド・シリンジユニット又はエクアシールド・メスルアーロックコネクタを切り離す場合は、本品のレバーを押しながら引く抜く。
引き抜く際にねじったり、回転等をしないように注意する。

【使用注意】

本品には、本品専用の「販売名:エクアシールド・シリンジユニット(届出番号23B1X90001000017)」又は、「販売名:エクアシールド・メスルアーロックコネクタ(届出番号23B1X90001000013)」を使用すること。

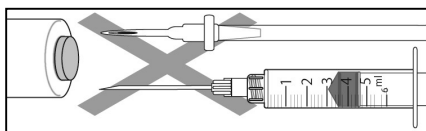

【使用上の注意】

[重要な基本的注意]

- 使用中は本製品の破損・接合部の緩み及び薬液漏れについて定期的に確認すること。

- ひび割れを確認した場合、直ちに新しい製品と交換すること。
- 接液部を汚染させないこと。
- 使用前に開封し、開封後は速やかに使用すること。
- 包装が破損・汚損している場合や、製品に破損などの異常が認められる場合は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

水濡れ、高温多湿及び直射日光を避けて保管すること。

[有効期限](自己認証による)

包装に記載。

【包装】

20個/箱

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

【製造販売業者】

アルゴキアシステム株式会社

愛知県豊田市花園町屋敷198番地2

TEL0565-51-0533 FAX0565-51-0528

ホームページ <http://www.argocs.com/>

【製造業者】

Equashield Medical Ltd. (イスラエル)

エクアシールドメディカル Ltd.

【総代理店】

株式会社トーショー

東京都大田区東糀谷3-8-8

TEL03-3745-1333 FAX03-3745-1547

ホームページ <http://www.tosho.co/>