

再使用禁止


エクアシールド・メスルアーロックコネクタ

【禁忌・禁止】


- 再使用禁止。

**【形状、構造及び原理等】

本品は滅菌済みディスポーザブル製品であり、一回限りの使用で再使用できない。

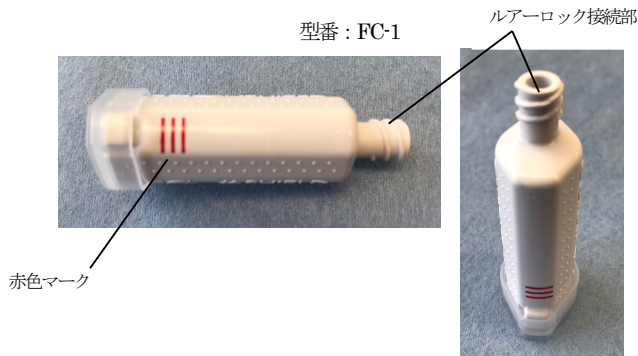

型番: FC-1S (スイベルメスルアーロック)

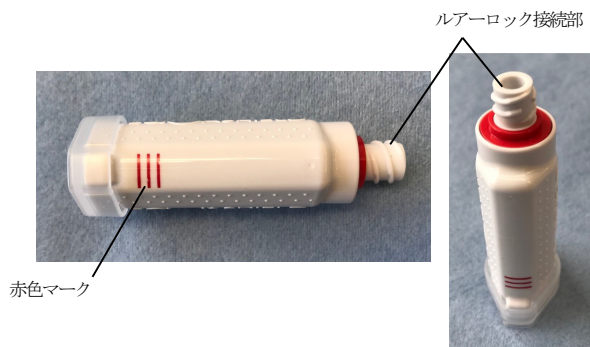

- 本品は針を内蔵する。
- 本品は DEHP 等の可塑剤を含まない。
- 本品はラテックス成分を含まない。

【使用目的又は効果】

本品は注射筒、オスルアーロックコネクタ、バイアルアダプタ、その他の器具等に含まれる薬剤を他の薬剤容器・器具へ閉鎖した状態に移すために使用する。

【使用上の注意】

注射筒・針用アダプタ「販売名:エクアシールド・オスルアーロックコネクタ」は本品専用とすること。

*【使用方法等】

本品の使用前に製造業者の「取扱説明書」を確認すること。

1. 注射筒・針用アダプタ「販売名:エクアシールド・オスルアーロックコネクタ」との接続方法

- 本品の赤色マークとオスルアーロックコネクタの赤色マークを合わせて接続する。
- オスルアーロックコネクタに接続中、ねじったり回転等をしないこと。
- 本品を切り離す場合、オスルアーロックコネクタのロッキングレバーを押して取り外す。

【使用上の注意】

【重要な基本的注意】

- 併用する医薬品及び医療機器の添付文書を確認後、使用すること。
- 適切に使用するために、本製品の使用方法を習熟した上で、施設の基準に従い使用すること。
- 使用中は本製品の破損・接合部の緩み及び薬液漏れについて定期的に確認すること。
- ひび割れを確認した場合、直ちに新しい製品と交換すること。
- 接液部を汚染させないこと。
- 使用前に開封し、開封後は速やかに使用すること。
- 包装が破損・汚損している場合や、製品に破損などの異常が認められる場合は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

水濡れ、高温多湿及び直射日光を避けて保管すること。

【有効期限】(自己認証による)

*【包装】

30個/箱

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

【製造販売業者】

アルゴキョアシステム株式会社
愛知県豊田市花園町屋敷1 9 8番地2
TEL0565-51-0533 FAX0565-51-0528
ホームページ <http://www.argocs.com/>

【製造業者】

Equashield Medical Ltd. (イスラエル)
エクアシールド メディカル Ltd.

*【総代理店】

株式会社トーショー
東京都大田区東糀谷3-8-8
TEL03-3745-1333 FAX03-3745-1547
ホームページ <http://www.tosho.cc/>