

再使用禁止

エクアシールド・シリンジシリンジコネクタ


【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止。

【形状、構造及び原理等】

本品は滅菌済み製品であり、一回限りの使用で再使用できない。

型番：LL-1DC

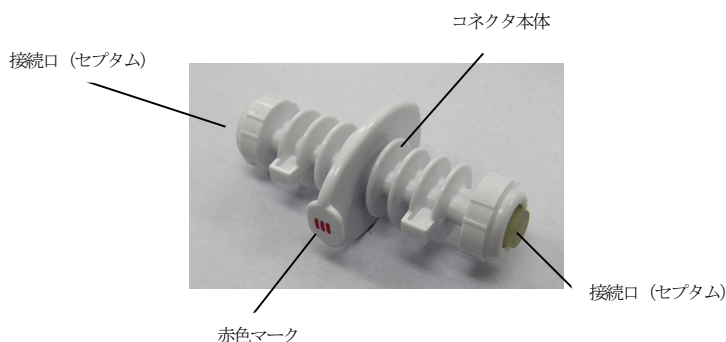

- 本品はDEHP等の可塑剤は含まない。
- 本品はラテックス成分を含まない。

【使用目的又は効果】

本品は、注射筒など薬液容器に装着して、注射筒など薬液容器に薬液などを閉鎖的に注入・排出するために用いる。


*【使用方法等】

本品の使用前に製造業者の「取扱説明書」を確認すること。

- 1) 包装を開封し、本品を包装内から取り出す。
- 2) 本品のシリンジシリンジコネクタに、エクアシールド・シリンジユニット(本届出に含まず)を接続する。
本品の接続口の赤色マークと、エクアシールド・シリンジユニットの赤色マークを合わせて確実に接続する。
接続の際及び接続後は、本品及びシリンジユニットをねじったり、回転させたりしないように注意する。
- 3) 接続を確認したら、一方のシリンジ内の薬液をもう一方のシリンジに注入する。
- 4) 注入後、本品のシリンジシリンジコネクタをシリンジユニットから引き抜く。
引き抜く際に、本品及びシリンジユニットをねじったり、回転させたりしないよう注意する。

【使用注意】

本品は、本品専用の「販売名：エクアシールド・シリンジユニット(届出番号23B1X90001000017)」を使用すること。

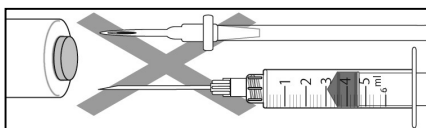

【使用上の注意】

【重要な基本的注意】

- 併用する医薬品及び医療機器の添付文書を確認の上、使用すること。
- 適切に使用するために、本製品の使用方法を習熟した上で、施設の基準に従い使用すること。
- 使用中は本製品の破損・接合部の緩み及び薬液漏れについて定期的に確認すること。
- ひび割れを確認した場合、直ちに新しい製品と交換すること。
- 接液部を汚染させないこと。
- 使用前に開封し、開封後は速やかに使用すること。
- 包装が破損・汚損している場合や、製品に破損などの異常が認められる場合は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

水濡れ、高温多湿及び直射日光を避けて保管すること。

【有効期限】(自己認証による)

包装に記載。

【包装】

10個/箱

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

【製造販売業者】

アルゴキョアシステム株式会社
愛知県豊田市花園町屋敷1-9-8番地2
TEL0565-51-0533 FAX0565-51-0528
ホームページ <http://www.argocs.com/>

【製造業者】

Equashield Medical Ltd. (イスラエル)
エクアシールド メディカル Ltd.

【総代理店】

株式会社トーショー
東京都大田区東糀谷3-8-8
TEL03-3745-1333 FAX03-3745-1547
ホームページ <http://www.tosho.cc/>