


仕様

名 称	錠剤自動仕分保管装置
型 式	GenieX
本 体 サ イ ズ※1	W600mm×D600mm×H1814mm（前面突起部を除く）
本 体 重 量※2	215kg
最 大 消 費 電 力	0.382kw 4.09A
電 源	AC100V±10V（単相アース付き×1口）
電 源 周 波 数	50/60Hz
仕分け可能な薬品	刻印・印字の無い薬品、透明な薬品、欠損した薬品、半錠、ソフトカプセル ※半錠・ソフトカプセルは機械内で除外します
投 入 可 能 な 薬 品	錠剤（φ4～φ23）、カプセル（0～5号）、半錠、ソフトカプセル
仕 分 け 可 能 な 薬 品	刻印・印字のある錠剤（φ4～φ23）、カプセル（0～5号） ※カプセルは印字は認識せず、色とサイズで仕分けます
薬 品 カ ッ プ	352個 ※容量 約70mL φ8mm×4mmの錠剤を150～160錠収納可能
薬 品 投 入 部	容量 約1700mL
仕 分 け 速 度	150錠/時
デ ィ ス プ レ イ	23.8インチ フルHD（1,920×1,080） 静電容量式タッチパネル
定 期 交 換 部 品	エアフィルター、エアホース、バキュームパッド ※1年に1回程度
カ ッ プ 呼 出 し	画面選択、錠剤カセット読取り、薬品GS1データバー読取り
分 包 機 カ セ ャ ッ ト 照 合	カップの二次元コードまたはラベルに印字した二次元コードで照合
デ ー タ 連 携	カセット情報/院内採用薬情報
オ プ シ ョ ン	ラベルプリンター、作業台、フロアプレート、除湿剤ホルダー、イオナイザー

※1 本体サイズにビスなどの突起物は含みません。
※2 薬品重量は含みません。

寸法図（mm）

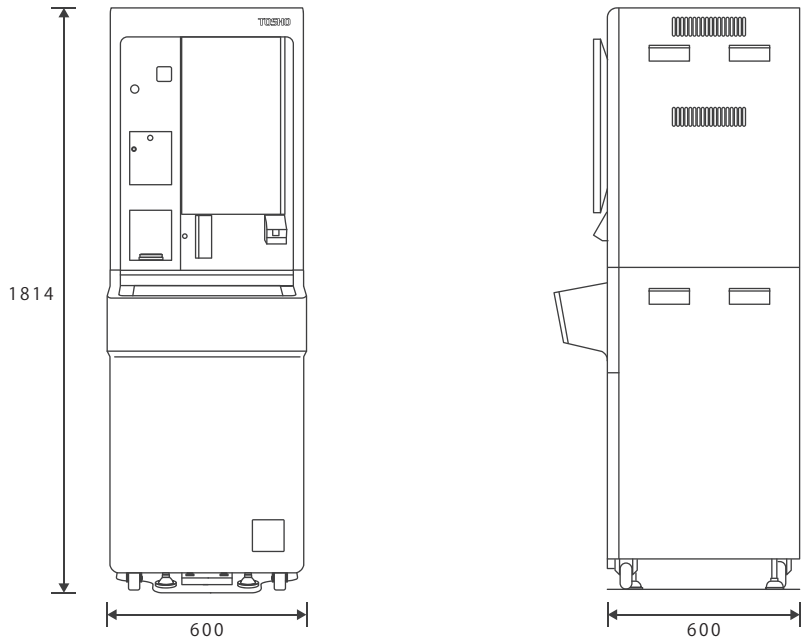

※ 仕分けの精度は100%ではありません。薬剤師による鑑査が必要です。 ※ 薬品マスターの配信料が別途必要です。

※製品改良のため仕様・構成などを予告なく変更させていただく場合がございます。
※本カタログは印刷のため実際の製品と色合いが多少異なる場合がございます。
※カタログ掲載内容は2026年8月現在のものです。

TOSHO
Your best pharmacy solution

株式会社トーショー
本社 〒144-0033 東京都大田区東糀谷3-8-8
TEL: (03)3745-1331 (代)

トーショー公式サイトはコチラ▶
<https://www.tosho.cc/>



○製品ご購入に関するお問合せ・ご相談は上記連絡先までお願い致します。

錠剤自動仕分保管装置

TOSHO
Your best pharmacy solution

GenieX
ジーニーエックス


返品薬品の仕分けを自動化して 薬品の廃棄量を大幅にカット
仕分けと保管の機能を兼ね備えた 調剤室の新しいパートナー




返品薬品、どうしていますか？

一包化された薬品を手作業で仕分けるのに、
時間と労力がかかっていませんか？
過誤のリスクのために、やむを得ず廃棄していませんか？

返品薬品に関する課題

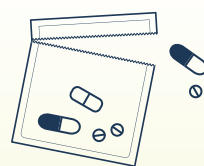

手作業による仕分け
の手間と負担

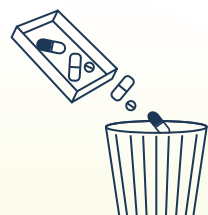

過誤のリスクによる
薬品の廃棄



仕分けた薬品の
保管場所の確保

GenieXの導入で

仕分けも保管も 分包機への返納までこの一台で

1時間あたり150錠の仕分け速度で返品薬品を
自動的に仕分けて、手作業の手間や、薬品の廃棄量を削減します。
352個の蓋付き薬品カップで薬品の保管庫としても利用可能です。
必要なときに自由に薬品を取り出す運用で、調剤を効率化します。



薬品カップ
352個搭載

薬品カップに収納された薬品は
そのまま保管可能です。



仕分け速度
150錠/h



幅、奥行ともにわずか600mm※1のコンパクトな設計で、
錠剤分包機の隣などのスペースに設置可能です。

分包機との連携 はもちろん、 スタンドアローン運用 にも対応できます。

薬品カップの呼出し方は運用に合わせて3パターン



錠剤カセットで呼出し※2



薬品バーコードで呼出し



薬品カップを選んで呼出し



※1 前面突起部を除く。 ※2 トーショー製錠剤カセット (IFコード付き) に限る。

シンプルな操作



返品された薬品を投入口に入れ、「仕分開始」ボタン
で仕分けを開始します。



呼び出した薬品カップの位置をLEDでガイド。
呼出し方は運用に合わせて選択可能です。

充実した鑑査サポート

鑑査画面



収納した薬品の画像を一覧で表示可能です。

刻印強調機能



撮影した薬品の刻印を強調することで、見や
すく表示します。

連続再生機能



収納した薬品の画像をスライドショー方式で
1枚ずつ順番に表示します。