

再使用禁止

エクアシールド・バイアルアダプタ

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止。

*【形状、構造及び原理等】

本品は滅菌済みディスポーザブル製品であり、一回限りの使用で再使用できない。



種類：

型番
VA-13/2
VA-17/2
VA-20/2(S)
VA-20C/2(S)
VA-28/2(S)
VA-32/2(S)

本品とバイアルの装着状態




- 本品はDEHP等の可塑剤を含まない。
- 本品はラテックス成分を含まない。

【使用目的又は効果】

本品はバイアル、シリンジユニット、その他の器具等に含まれる薬剤を他の薬剤容器・器具へ開鎖した状態で移すために使用する。

**【使用上の注意】

本品の接続口(セプタム)には指定の医療機器「販売名:エクアシールド・シリンジユニット(届出番号 23B1X90001000017)」を使用すること。

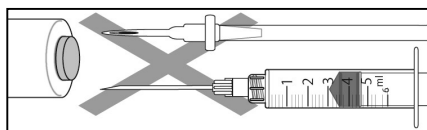

【使用方法等】

本品の使用前に製造業者の「取扱説明書」を確認すること。

1. 汎用注射筒「販売名:エクアシールド・シリンジユニット(届出番号 23B1X90001000017)」との接続方法

①薬剤をバイアルから吸引する場合

- 本品をバイアル上でカチッと鳴らして取付け、キャップを取り外す。
- 本品の赤色マークとシリンジユニットの赤色マークを合わせて接続する。
- シリンジユニットに接続中または接続後、ねじったり回転等をしないこと。
- バイアルを逆向きにして、バイアルから薬剤を吸引する。
- 薬剤吸引完了後、本品からシリンジユニットを取り外す。

②薬剤の調整及びバイアルへの移送

- 薬剤パック又は薬剤ボトルからシリンジユニットへ調整用の溶解液を吸引する。
- 溶解液吸引完了後、シリンジユニットを本品の赤色マークを合わせて接続する。
- シリンジユニットからバイアルへ採取した溶解液を注入する。
- シリンジユニットに接続中または接続後、ねじったり回転等をしないこと。
- 溶解液とバイアル内の薬剤を混合し、溶解された薬剤をバイアルからシリンジユニットへ再度吸引する。
- 薬剤吸引完了後、本品からシリンジユニットを取り外す。

【使用上の注意】

【重要な基本的注意】

- 併用する医薬品及び医療機器の添付文書を確認後、使用すること。
- 適切に使用するために、本製品の使用方法を習熟した上で、施設の基準に従い使用すること。
- 使用中は本製品の破損・接合部の緩み及び薬液漏れについて定期的に確認すること。
- ひび割れを確認した場合、直ちに新しい製品と交換すること。
- 接液部を汚染させないこと。
- 使用直前に開封し、開封後は速やかに使用すること。
- 包装が破損・汚損している場合や、製品に破損などの異常が認められる場合は使用しないこと。
- バイアル製品の中には、アルミキャップの高さが短いものがある。その為、バイアルアダプタを装着する際、バイアルに密着して止まるまでしっかり押し込むこと。薬剤や溶解液の注入・吸引操作の際も密着状態を保持すること。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

水濡れ、高温多湿及び直射日光を避けて保管すること。

【有効期限】(自己認証による)

*【包装】

- VA-13/2: 30個/箱
- VA-17/2: 30個/箱
- VA-20/2(S): 10個/箱・50個/箱
- VA-20C/2(S): 10個/箱
- VA-28/2(S): 10個/箱
- VA-32/2(S): 25個/箱

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

【製造販売業者】

アルゴキョウシステム株式会社

愛知県豊田市花園町屋敷198番地2

TEL0565-51-0533 FAX0565-51-0528

ホームページ <http://www.argocs.com/>

【製造業者】

Equashield Medical Ltd. (イスラエル)

エクアシールド メディカル Ltd.

【総代理店】

株式会社トーショー

東京都大田区東糞谷 3-8-8

TEL03-3745-1333 FAX03-3745-1547

ホームページ <http://www.tosho.cc/>