

PTP鑑査支援システム

Peech

GS1バーコードで複数薬品を同時にスピード照合
画像でログが記録され、履歴確認もスムーズです。


デスクトップ型



タブレット型

省スペース向け

Peech mini

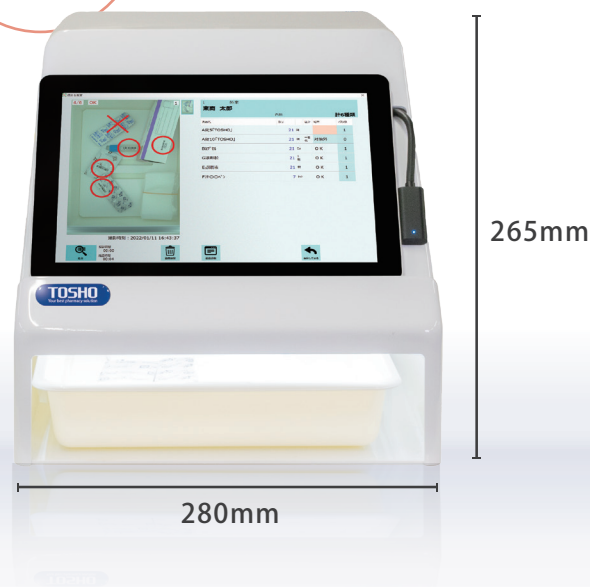

■ 簡単操作で調剤ミスを防止



取り揃えた薬品と処方箋を
画面下のトレイに入れます。



撮影画像からバーコードを
読み取り、自動的に鑑査が
スタートします。



処方データと薬品を照合して、
「○」「×」などの印と音でお知らせ。
正しい調剤をサポートします。

■ 鑑査をサポートする機能も充実

バーコードが読み取れない

薬品を照合する場合

付属のバーコードリーダーで
読み取って、照合できます。



薬品のバーコードが


切れてしまっている場合

PTPシートのバーコードが
切れていたり、バーコードがない場合
目視で薬品を確認し記録を残せます。



画像履歴が残るから、 こんなときでも安心！


Peechには、鑑査した日時・患者名・処方内
容・撮影画像がログとして記録できます。
患者様からお問い合わせがあっても、安心
して対応できます。

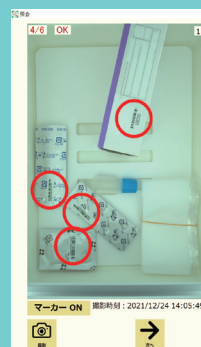


担当していない
調剤も履歴が
残っているから安心



Peech

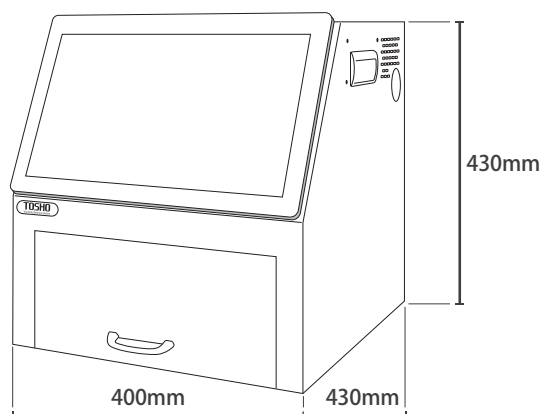

Peech mini

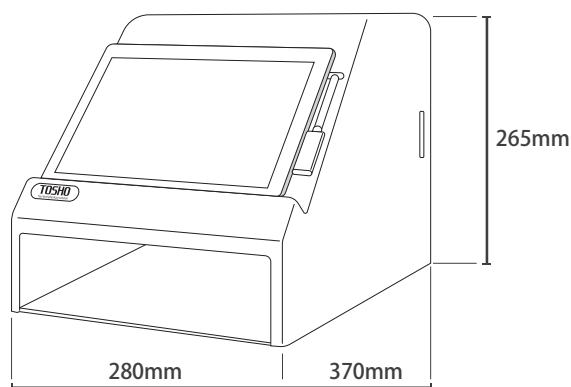

名 称	PTP鑑査支援システム	PTP鑑査支援システム
型 式	Peech	Peech mini
本 体 サ イ ズ※1	W400mm×D430mm×H430mm	W280mm×D370mm×H265mm
本 体 重 量	20kg	5kg
OS	Windows10 Pro	Windows10 Pro
ス ペ ッ ク	Intel Corei5 3.2GHz メモリ 4GB以上	IntelPentium CPU4415 1.61GHz 実装RAM 8GB
対応トレーサイズ	W250mm×D340mm×H110mm	W230mm×D300mm×H70mm
デ ィ ス プ レ イ	タッチパネル方式	タッチパネル方式
付 属 品	デスクトップPC、外付HDD、バーコードリーダー	タブレットPC、バックアップ用USB、バーコードリーダー
最大消費電力	300VA AC100V 50/60Hz	160VA AC100V 50/60Hz

※1 本体サイズにビスなどの突起物は含まれません ※多数の薬品を同時照合した場合、照合に時間がかかる場合があります。 ※数量鑑査はできません。 ※本製品は、薬品照合する製品であり、最終鑑査を保证するものではありません。
※調剤事故による患者様および使用店舗様の損害について、弊社は責任を負いかねます。
※製品改良のため仕様・構成などを予告なく変更させていただく場合がございます。
※本カタログは印刷のため実際の製品と色合いが多少異なる場合がございます。
※カタログ掲載内容は2022年2月現在のものです。

TOSHO
Your best pharmacy solution

株式会社トーショー
本社 〒144-0033 東京都大田区東糀谷3-8-8
TEL: (03) 3745-1331 (代)

トーショー公式サイトはコチラ▶
<https://www.tosho.cc/>



○製品ご購入に関するお問合せ・ご相談は上記連絡先までお願い致します。