

SW-K

散薬監査業務を正確かつ効率的に行う為の、卓上型散薬監査システムです。


調剤過誤防止をテーマに、いつ、誰が、何を、どの様にを確実にチェック及び記録する為、薬品照合、秤量、処方チェック、充填チェック、調剤結果の出力をします。卓上型なので設置場所に限定されません。



▶▶ 監査システムにおける3つの柱


調剤者チェック

リスクマネジメントの観点からSW-Kでは、調剤者のパスワードを入力する必要があります。パスワードを正しく入力する事により、薬品秤量画面へ進みます。

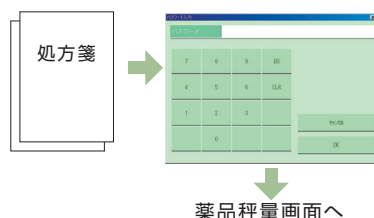


処方チェック

薬品マスターに常用量（1日、1回、体重）、長期投与、配合禁忌等を入力することで各処方チェックを行います。また、環境設定にて薬品の重複チェックも行えます。

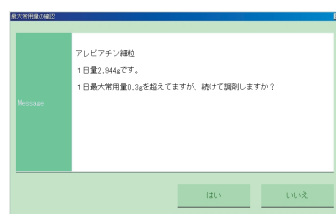

充填チェック

薬品マスターに登録されている散薬瓶のバーコードと薬品のJANコードにて、充填チェックを行います。薬品の照合が違う場合は、警告画面が表示され充填ミスを防ぎます。充填履歴は、薬品毎、充填日毎で印刷する事ができます。

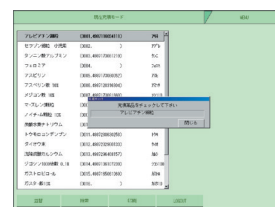

仕 様

仕様項目	
品名	簡易型散薬監査システム
型式	SW-K
本体	抵抗膜方式タッチパネル12.1型TFTカラーLCD搭載型PC W320mm×D27.5mm×H250mm
表示	TFTカラー液晶ディスプレイ 1024×768ドット
薬品照合方式	バーコードリーダ回転ポリゴンミラー式 各種バーコード対応 登録バーコード4桁 or 13桁 W104mm×D115mm×H164mm
秤量	電子天秤 EK-320HR(標準装備) 大レンジ(320/0.1g) 小レンジ(20/0.01g) デュアルレンジ方式 W200mm×D253mm×H73mm
監査印字	サーマルプリンター 用紙幅:80mm 黒色印字 (オプションにて赤黒印字可能) W145mm×D190mm×H114mm
電源	AC100V±10% 50/60Hz
消費電流	0.5A
対象薬剤	散剤、細粒剤、顆粒剤
業務内容	調剤業務(ローカル調剤)、充填業務、薬品登録業務
各種マスター管理	薬品、分類1,2,3、用法、配合禁忌マスター等
処方チェック	極量、常用量、長期投与、配合禁忌、薬品の重複、劇、毒、麻、向精神薬
各履歴保持	調剤履歴(患者毎)、充填履歴
パスワード	パスワードによるセキュリティ機能

▶▶ 電子天秤EK-320HR (標準装備)

- 特定計量器 (M級国家検定) 補助目盛付
- 補助目盛を一定時間表示
- デュアルレンジ機能


※使用地域に限定があるため注文時に使用地域(都道府県)をご指定ください。
地域の異なる場所での使用は禁じられています。



▶▶ オプション

GX-400R

- 高精度でハイスピード
- 校正用分銅内蔵でいつでも高精度計量
- 高速1秒応答
- クッキリ見やすい蛍光表示

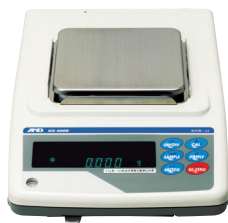

ET-300WR

- 特定計量器 (H級国家検定) 補助目盛付
- 校正用分銅内蔵でいつでも高精度計量
- 薬包紙等が計量皿より外に出ていても計量結果が把握できるスタンド型表示



※製品改良のため仕様・構成などを予告なく変更させていただく場合がございます。
※本カタログは印刷のため実際の製品と色合いが多少異なる場合がございます。
※カタログ掲載内容は2009年1月現在のものです。

TOSHO
Your best pharmacy solution

株式会社トーショー
本社 〒144-0033 東京都大田区東糀谷3-8-8
TEL: (03) 3745-1331 (代)

トーショー公式サイトはコチラ▶
<https://www.tosho.cc/>



○製品ご購入に関するお問合せ・ご相談は上記連絡先までお願い致します。