

Xana-UF

Xana-1360UF
Xana-2040UF



ユニバーサル性の、あくなき追求。



Xana-UF depth600mm series

省スペースでも高い機能性。



Xana-UF

奥行 600 mmとコンパクトな筐体に、UF (ユニバーサルフィーダー)、Full U2、LED ガイド付き錠剤コンベアなどハイスペック機能を搭載しました。さまざまな調剤現場に柔軟に対応します。

錠剤カセット
自動認識システム

Full U2

錠剤コンベア

66マス
セミオート

錠剤コンベア
撒き間違い防止

LEDガイド

分包速度

最速 54包/分
当社規定フォームによる

分包紙に自由な
印字レイアウト

Windows
フロント

奥行き

600mm
省スペースモデル

1. ラインアップ



Xana-1360UF



Xana-2040UF

本体サイズ	W900×D600×H1960(mm)	W1160×D600×H1960(mm)
カセット搭載数	136 個	204 個
UF 搭載数	4 個 /8 個	4 個 /8 個

2. 特徴




■ スライドキャビネット

デッドスペースの少ないスライド式で、1 棚で 68 個のカセットを搭載します。錠剤不足時には該当するキャビネットとカセットベースのLEDを赤色に点灯してお知らせします。



■ Full U2 フルユーツー

U2 とは錠剤カセットと薬品マスタ上のカセット情報の紐付けにより、好きな場所にカセットをセットすることができる機能です。Xana-UF はすべてのフィーダーベースが U2 に対応しています。

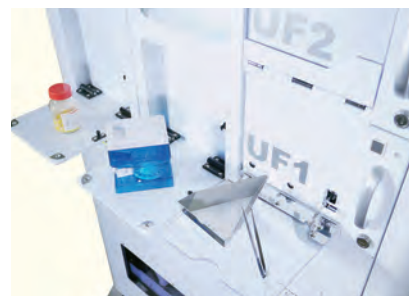

■ 作業テーブル

キャビネット前面の作業テーブルの利用で、分包機から離れずに充填作業を行うことができます。

これひとつで、
様々な形状・サイズの錠剤に対応。




Universal Feeder

ユニバーサルフィーダー

錠剤カセットがなくても手撒きコンベアを利用することなく、リアルタイムに形状変更しスムーズに錠剤の高速分包を実現します。

カプセルや楕円錠のみならず、Bladeでカットした半錠や、球状の薬品に対しても高度な Universal (汎用な、万能な) 性を発揮します。



1. 薬品の充填方法

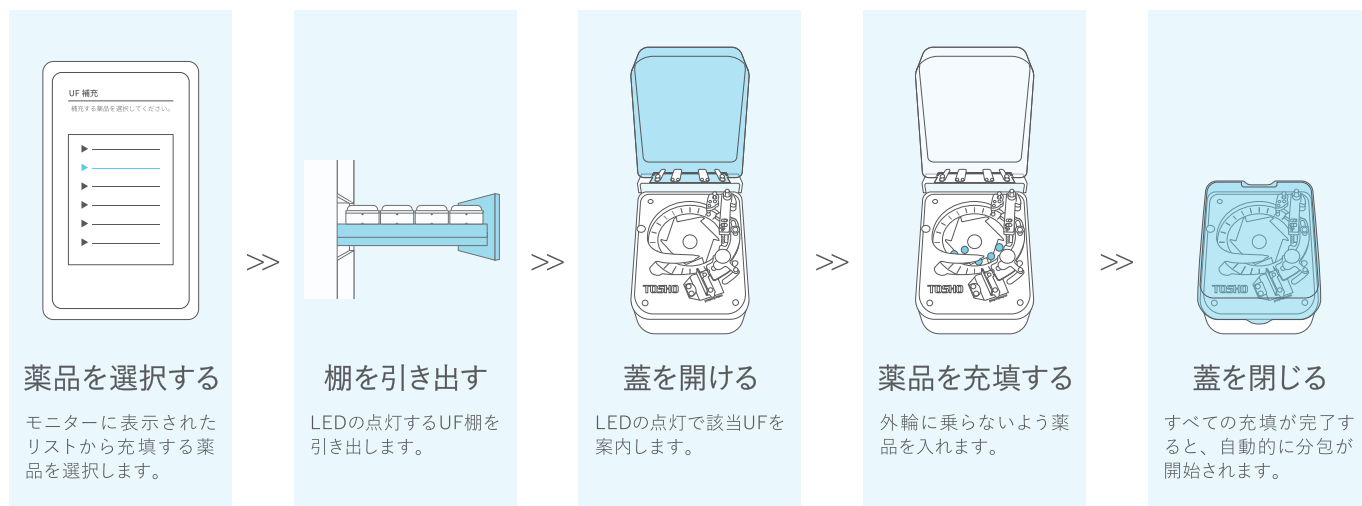

2. UFの交互運用



UFを8個搭載した筐体は、UF棚が2段になります。一方の段のUF補充薬品の分包中に、もう一方の段のUFに薬品を補充することができます。上段下段で分包・補充を交互に行うことで、分包機を止めないスムーズな運用が可能になります。

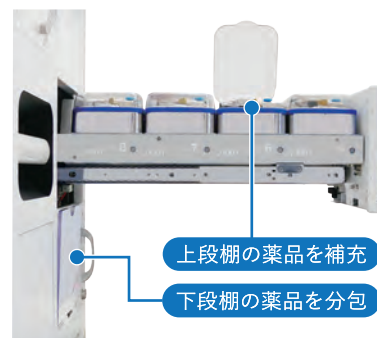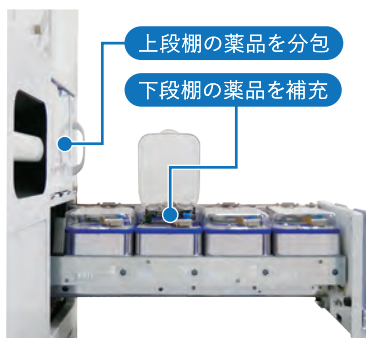

3. メンテナンス

シンプルな機構のため、分解清掃が容易に行えます。

★部品には耐熱、耐水部材を使用しているため丸洗い・乾燥が可能であり、高いメンテナンス性を実現しています。



66 マスセミオートコンベア



センサーで捉えきれない小さな錠剤や1/4錠の分包、薬品の種類がUF搭載数を超えたときなどに使用します。UFのサポート的位置づけとして、業務を抜かりなくアシストします。

撒き間違い防止 LEDガイド

マス一つひとつにつけられたLEDガイドの案内で、直感的にかつ確実に錠剤を撒くことができます。

シンプルな画面で
分包機を操作。

Glitter

Xana-UF シリーズは専用ソフト『Glitter』で分包機を操作します。筐体そなえつけのタッチモニターから分包状況の確認や補充作業が可能です。フル HD の大きな画面で直観的でシンプルな使い勝手を目指しました。

分包中は薬品名や分包数、残りの包数などの確認ができるほか、UF の薬品回収や補充作業などさまざまな操作を行うことができます。



feature. 画面紹介

■ UF 補充ガイド

UF に薬品を補充するときはイラストを使いながら、1 アクションごとに手順を案内します。



■ アラーム通知

アラームをポップアップでお知らせします。Glitterの操作は通常時と変わらずに行うことができます。



■ 分包停止エラー


分包が続けられない程度のエラーは赤色の画面でお知らせします。




安定性の高い
横型包装機。

包装機

TOSHO 独自の横型包装機を搭載しました。
錠剤投入ホッパーが上下動しながら薬品を包装。
より多くの錠剤をしっかりと一包化します。

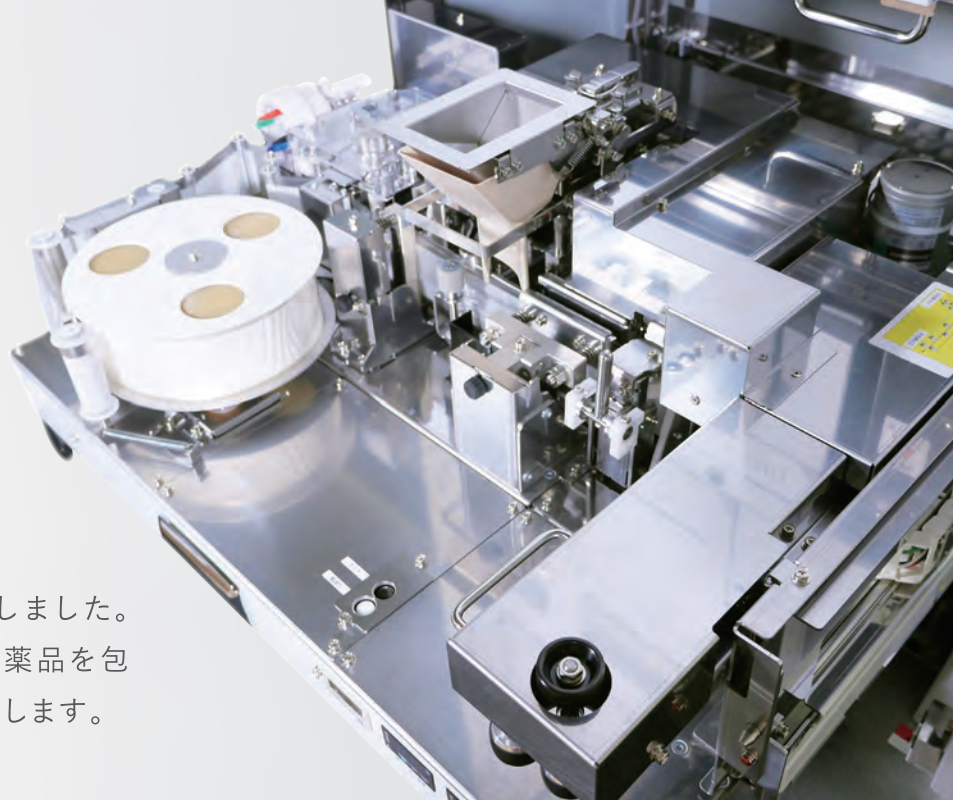


1. 特徴

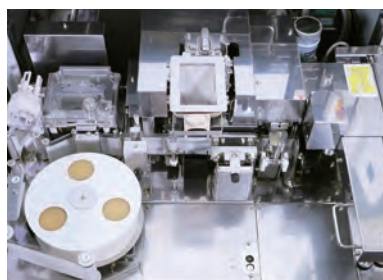

■ 横型包装機

包装機部分は引き出し可能で分包紙の交換、清掃も簡単。最適化された包装機構は、一包あたりの錠剤数が増えても安定した分包を可能にしました。

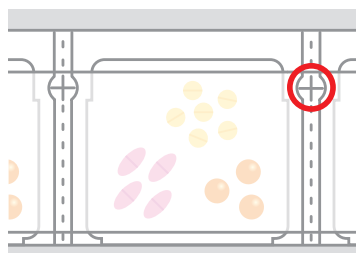

■ 包装紙

分包紙へのヒートシールにはイージーカットを採用しているので開封が容易。また、エアリア分包紙を使用すれば縦からも開封することができます。

2. メンテナンス

残薬の付着しやすい錠剤経路の固定ホッパーやシール接着の縦横ヒーター部分がワンタッチで着脱可能です。容易にお掃除ができるので分包精度の安定に貢献します。

■ 固定ホッパー



■ 縦横ヒーター



印字性能 Windows フォント・ハイクオリティ印字



レイアウト例



PC 上に表示される文字を分包紙にそのまま印字することができます。フォントや文字サイズも自由自在。外字などの文字制限もありません。ロゴや画像といったイメージも取り込み、アイデア次第で可能性は無限に広がります。

また、Xana-UFから印字精度が大幅に向上。視認性が高まり、細い線まではっきり出力できる高精細なハイクオリティ印字が実現しました。

仕様

仕様項目		
名称	全自動錠剤分包機	
型式	Xana-1360UF	Xana-2040UF
本体サイズ	W900×D600×H1960(mm) (本体サイズにビスなどの突起物は含みません。)	W1160×D600×H1960(mm) (本体サイズにビスなどの突起物は含みません。)
フロアプレートサイズ※	W900×D990(mm)	W1160×D990(mm)
本体重量	約550kg	約600kg
電源	単相 AC 100V	
電源周波数	50/60Hz	
最大消費電力	430W	
最大電流値	4.3A	
制御方法	分散接続CPU制御方式	
外部入力装置	デスクトップPC LAN接続	
錠剤棚	カセット	ローターカセット(BC2)
	カセット数	最大136カセット(全Sカセット)
	U2	全ベースU2機能標準搭載(Full U2 Zone)
	UF	4個/8個
錠剤コンベア	66プラス式セミオートコンベアユニット(LEDガイド搭載)	
予備置きカセット	66予備置きマス	
包装機構	横型錠剤包装機	
印字方式	全行・2行印字対応 熱転写方式	
WindowsFont機能	標準搭載 ※2行印字時は、30mmリボンをご使用ください ※D-545Fine (インクリボン) を推奨	
分包紙サイズ	W80×H70固定	
分包速度	54包/分 (弊社測定フォームによる)	



※転倒防止用フロアプレートを標準装備。

添付品オプション



- ノイズカットランス (分包機へのAC電源のノイズを軽減できます。)
- 予備置きカセット (標準添付品1ヶの他に、別途ご注文頂けます。)
- 安定化電源

■ 寸法 単位 [mm]

Xana-1360UF

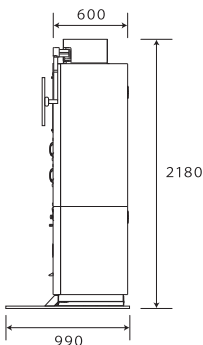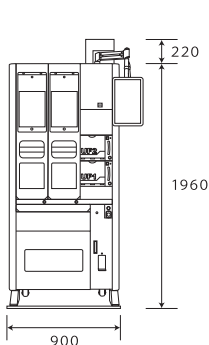

Xana-2040UF

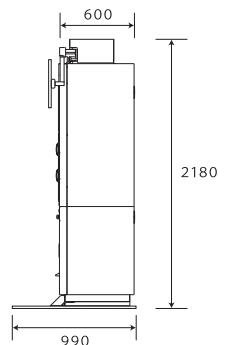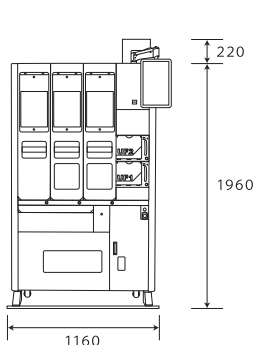

※改良のため、仕様・構成などを予告なく変更させていただく場合がございます。 ※本カタログは印刷のため、実際の色と異なることがあります。

TOSHO
Your best pharmacy solution

●本社 東京都大田区東糎谷3-8-8 〒144-0033 TEL (03) 3745-1331 (代)

www.tosho.cc/

札幌支店	北海道札幌市清田区真栄一条2-34-10	〒004-0831	TEL (011) 885-2781	岐阜営業所	岐阜県岐阜市芋島2-2-6	〒500-8234	TEL (058) 259-7125
旭川営業所	北海道旭川市東4条2-3-6	〒070-0024	TEL (0166) 29-5265	三重営業所	三重県津市北丸之内74 マツダビル1F	〒514-0031	TEL (059) 222-7719
帯広営業所	北海道帯広市西二条北2-17-1	〒080-0032	TEL (0155) 26-6750	東海支店	静岡県浜松市南区三和町295-103号	〒435-0038	TEL (053) 411-8688
函館営業所	北海道函館市桔梗町418-443 アビタシオン101号室	〒041-0801	TEL (0138) 34-2235	静岡営業所	静岡県静岡市清水区八坂北1-13-3	〒424-0023	TEL (054) 361-1611
盛岡支店	岩手県盛岡市愛宕町3-17	〒020-0013	TEL (019) 652-2063	京都支店	京都府京都市南区上鳥羽藁田24	〒601-8133	TEL (075) 691-2801
青森営業所	青森県青森市幸畑3-12-3	〒030-0943	TEL (017) 764-3177	奈良営業所	奈良県奈良市北之庄西町1-8-10	〒630-8452	TEL (0742) 62-5544
秋田営業所	秋田県旭田市山王沼田町3-1	〒010-0954	TEL (018) 867-8090	滋賀営業所	滋賀県栗東市穂1-17-8 栗東シティビル 503号室	〒520-3031	TEL (077) 554-2205
仙台支店	宮城県仙台市宮城野区幸町3-4-15	〒983-0836	TEL (022) 257-0160	大阪支店	大阪府大阪市住吉区長居東3-15-31	〒558-0004	TEL (06) 6608-7122
郡山営業所	福島県郡山市富田町字上ノ内5-2	〒963-8041	TEL (024) 962-7712	和歌山営業所	和歌山県和歌山市新通1-17	〒640-8111	TEL (073) 424-6880
新潟支店	新潟県新潟市西区善久1044-23	〒950-1102	TEL (025) 379-1211	兵庫支店	兵庫県神戸市中央区磯辺通3-2-11 三宮ファーストビル1F	〒651-0084	TEL (078) 806-8072
宇都宮営業所	栃木県宇都宮市城南3-11-6	〒321-0117	TEL (028) 688-5771	岡山営業所	岡山県岡山市北区野田3-1-18 安田ビル6F	〒700-0971	TEL (086) 244-7835
山形営業所	山形県山形市蔵王成沢894-1	〒990-2334	TEL (023) 689-9580	香川支店	香川県高松市松縄町34-2	〒760-0079	TEL (087) 833-2533
北陸支店	石川県金沢市広岡2-13-37 ST金沢ビル4F	〒920-0031	TEL (076) 263-0231	松山営業所	愛媛県松山市古川西2-8-1 西沢ビル103号	〒790-0944	TEL (089) 969-0380
富山営業所	富山県富山市黒瀬北町1-10-7 MNビルA-5	〒939-8216	TEL (076) 420-9711	高知営業所	高知県高知市北久保10-16 北久保468ビル	〒781-0088	TEL (088) 880-9621
福井営業所	福井県福井市南四ツ屋1-10-13 青山ビル	〒918-8204	TEL (0776) 54-8618	徳島営業所	徳島県徳島市中島町2-21-1/イッツミレット102号	〒770-0052	TEL (088) 678-5563
松本支店	長野県松本市野満東1-16-20	〒399-0034	TEL (0263) 27-3766	広島支店	広島県広島市西区東観音町18-9 パールマンション東観音1F	〒733-0032	TEL (082) 208-0940
高崎営業所	群馬県高崎市緑町1-10-3	〒370-0703	TEL (027) 361-7932	山口営業所	山口県山口市小郡御幸町5-36 アーバンステージ101号	〒754-0011	TEL (083) 902-5890
東京支店	東京都大田区東糎谷3-13-7 3F	〒144-0033	TEL (03) 3745-1381	鳥取営業所	鳥取県米子市米原4-6-75	〒683-0804	TEL (0859) 31-1560
東京第一営業所	東京都板橋区栄町21-10 エクスレ大山ハンモット1F	〒173-0015	TEL (03) 6905-2761	福岡支店	福岡県福岡市博多区上牟田2-12-24	〒812-0006	TEL (092) 452-3234
神奈川支店	東京都大田区東糎谷3-13-7 3F	〒144-0033	TEL (03) 3745-1383	福岡支店	福岡県北九州市小倉北区若富士町7-10 グロワール21	〒802-0063	TEL (093) 951-8830
厚木営業所	神奈川県厚木市岡田1-7-1 ヴェルデミールSUZUMI 103号	〒243-0021	TEL (046) 230-4776	長崎営業所	長崎県長崎市大橋町27-20 ハビネス文教2F	〒852-8134	TEL (095) 849-1322
多摩支店	東京都府中市住吉町4-21-1	〒183-0034	TEL (042) 364-3981	熊本営業所	熊本県熊本市東区長嶺東8-2-92	〒861-8038	TEL (096) 380-3530
山梨営業所	山梨県甲斐市西八幡3707-3	〒400-0117	TEL (055) 260-7371	大分営業所	大分県大分市大道町4-5-17 第3阿部ビル102号	〒870-0822	TEL (097) 545-0826
川口支店	埼玉県川口市南鳩ヶ谷1-14-22	〒334-0013	TEL (048) 287-6630	宮崎営業所	宮崎県宮崎市大字吉1881-1 シーサイドテラス 1F	〒880-0911	TEL (0985) 33-9113
千葉支店	千葉県千葉市花見川区横橋町1551-1 与志ビル1F	〒262-0013	TEL (043) 250-2301	鹿児島営業所	鹿児島県鹿児島市桜ヶ丘1-9-10	〒891-0175	TEL (099) 284-4136
名古屋支店	愛知県名古屋市中村区名駅南2-9-18 OP名古屋ビル3F	〒450-0003	TEL (052) 433-1612	沖縄営業所	沖縄県宜野湾市真志喜2-7-6	〒901-2224	TEL (098) 890-4771